



# 物料规格书

|                       |      |  |         |                |      |           |
|-----------------------|------|--|---------|----------------|------|-----------|
| 文件编号： G25.03.04001010 |      |  | 版本： A/1 |                |      |           |
| 物料名称                  |      | 退热贴说明书   | 物料编号    | 25.03.04001010 | 规格型号 | 140*105mm |
| 序号                    | 项目   | 规格要求   |         |                |      | 备注        |
| 1                     | 物料分类 | 一般   |         |                |      |           |
| 2                     | 包装   | 1、 保护性包装<br>2、   |         |                |      |           |
| 3                     | 材质   | 157g双铜纸  |         |                |      |           |
| 4                     | 外观   | 1、 表面平整无皱褶，无破损、刮伤、划痕<br>2、 无明显杂色、杂点<br>3、 字迹清晰，内容与附页无差异。<br>4、 无 |         |                |      |           |
| 5                     | 尺寸   | 140*105mm  |         |                |      |           |
| 6                     | 性能   |  |         |                |      |           |

示意图



**欧勒**

医用退热贴说明书

【产品名称】医用退热贴

【组成成分】由无纺布衬层、凝胶层、聚乙烯薄膜覆盖层等部分组成，不应含有药理学、免疫学或者代谢作用的成分。

【预期用途】用于物理退热、冷敷理疗。仅用于闭合性软组织。

【适用人群】3月龄以上人群。

【适用范围】适用于成人及儿童身体局部体表降温。

【使用方法】撕开包装袋，将贴片的保护隔膜揭开，贴在额头等清洁的皮肤上。

【储存方法】高分子凝胶产品，请保存在阴凉避光处。开封后备用时入冰箱冷藏室（勿放入冷冻室）内效果最佳。

【注意事项】1.勿贴于眼睛四周及面部。

2.外用贴剂，请勿误食，儿童应在家长的监护下使用。

【禁忌】皮肤有湿疹、创伤及过敏者请勿使用。

【规格】110×40mm

【型号】儿童型

【备案凭证编号】粤穗械备20150137号

【产品技术要求编号】粤穗械备20150137号

【有效期】二年

【备案人名称】广州市雨纯生物科技有限公司

【备案人注册地址】广州市增城中新镇福和坪中南路151号首层

【生产单位】广州市雨纯生物科技有限公司

【生产备案凭证编号】粤穗食药监械生产备20150062号

【生产地址】广州市增城中新镇福和坪中南路151号首层

【售后服务单位】广州德米医用设备有限公司

【总经理】广州德米医用设备有限公司

【总经销地址】广州市番禺区沙湾镇大巷涌路131号

【电话】020-31051999

说明书编制日期2016年7月20日

备注：